

HR - CHECK

HR-Check kahva

HR-Check -kahva on suunniteltu hevosen lepo- ja palautumissykkeen mittaamiseen. HR-Check -kahva sisältää langattoman lähettimen, minkä avulla laite lähettää mittaamansa sykkeen TimerGPS+ -laitteeseen.

HR-Check kahvan yhdistäminen TimerGPS+ -laitteeseen

1. Kostuta kahvan kummankin pään sähköä johtavat pinnat. Älä kuitenkaan upota kahvaa veteen. Riittää, että kahvan päät kostuvat.
2. Aseta kahva tämän jälkeen tukevasti, ei kuitenkaan voimalla painaen hevosen kylkeä vasten ja pidä kahvaa kylkeä vasten pystyasennossa.
3. Tuo TimerGPS+ laite käynnistettynä perustilassa (ruudussa lukee laitteen nykyinen versionumero) kahvan lähelle (max. 20cm päässä laitteesta) ja odota hetki.
4. Kun kahva löytää hevoselta sykkeen, käynnistyy sykkeen mittaustila automaattisesti.

Sykkeen tallentaminen TimerGPS+ -laitteen muistiin

1. Voit tallentaa sykkeen haluamasi hevosen muistiin painamalla sykkeen mittauksen aikana START/STOP-näppäintä.
2. Voit poistua sykkeenmittaustilasta painamalla INT/BACK-näppäintä.

Puhdistaminen

1. Laite voidaan puhdistaa hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään hankaavia aineita tai materiaaleja laitteen puhdistuksessa..
2. Pyyhi laite puhtaaksi ja anna kuivua. Laitetta ei saa jättää suoraan auringonpaisteeseen.
3. Suosittelemme säilyttämään kahvaa sisätiloissa silloin kun sitä ei käytetä. Pakkanen voi vaikuttaa laitteen pariston kestoon.

TimerGPS Europe OY
Temmeksentie 3, ovi 961
90400 Oulu, FINLAND

www.timergps.com